

Arrow™

Auswahl der richtigen EZ-IO™ Nadel



ARROW™ EZ-IO™
15-mm-Nadelset
3–39 kg



ARROW™ EZ-IO™
25-mm-Nadelset
3 kg und mehr



ARROW™ EZ-IO™
45-mm-Nadelset
40 kg und mehr


Das Gewicht dient nur als Anhaltspunkt und die klinische Beurteilung sollte auf dem Gewicht des Patienten, der Anatomie und der Gewebetiefe basieren.

1




ÜBERPRÜFUNG

Untersuchen Sie die Einführungsstelle, um die ungefähre Gewebetiefe zu ermitteln.


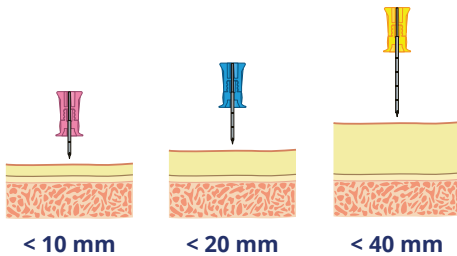


2

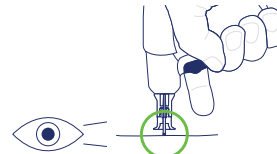


BESTÄTIGEN

Führen Sie die Nadel ein, bis die Spitze am Knochen anliegt, und vergewissern Sie sich, dass mindestens eine schwarze Linie sichtbar ist (mindestens 5 mm).

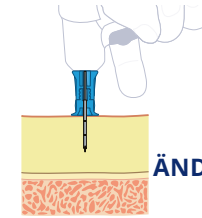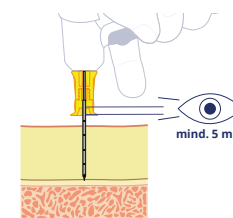


ÄNDERUNG


Wenn nicht mindestens eine schwarze Linie sichtbar ist, Nadel entfernen und zur nächsthöheren Größe wechseln

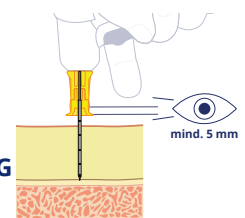

FORTFAHREN

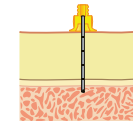

FORTFAHREN

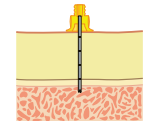

Teleflex, das Teleflex-Logo, Arrow und EZ-IO sind Marken bzw. eingetragene Marken von Teleflex Incorporated und seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.
Stand der Informationen: 09/2024. © 2024 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
MCI-101801 · REV 0 · 09 24 PDF

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com

[teleflex.com/...](https://teleflex.com/)

Teleflex™
Empowering the future of healthcare