

# Invasive Blutdruckmessung Anleitung

Invasive Blutdruckmessung mit dem Corpuls C3

- [Invasive Druckmessung Corpuls C3 Anleitung](#)

# Invasive Druckmessung

## Corpuls C3 Anleitung


# Anleitung Invasive RR-Messung

Aus Liebe zum Menschen.




**1.** Stammkabel (Y-Kabel) bei Steckplatz P1/P2 einstecken

**2.** Adapterkabel mit Messplatte an Verbindung P1 anschließen

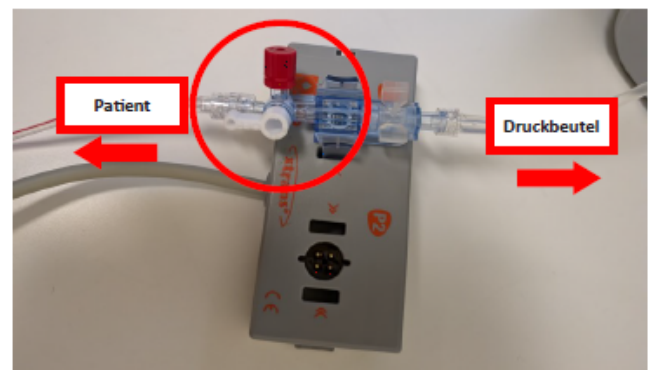

**3.** Transducer auf Messplatte stecken

**4.** 3-Wege-Hahn wie abgebildet drehen

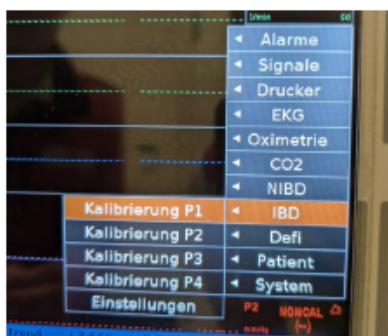

**5.** Messplatte auf Herzhöhe  
Kalibrierung des Systems (Sek. Ansicht)  
Menü > IBD > P1 Kalibrieren

**6.** 3-Wege-Hahn wie abgebildet drehen