
Invasive Druckmessung Corpuls C3 Anleitung

Anleitung Invasive RR-Messung

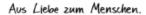








P1



 Stammkabel (Y-Kabel) bei Steckplatz P1/P2 einstecken

2. Adapterkabel mit Messplatte an Verbindung P1 anschließen




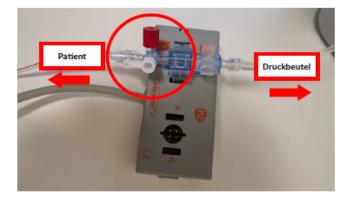

3. Transducer auf Messplatte stecken

4. 3-Wege-Hahn wie abgebildet drehen



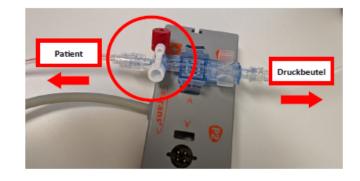

Messplatte auf Herzhöhe
Kalibrierung des Systems (Sek. Ansicht)
Menü > IBD > P1 Kalibrieren

6. 3-Wege-Hahn wie abgebildet drehen